

INSTRUKCJA POBRANIA

HORMON ZE ŚLINY



WAŻNE

W przypadku pobierania różnych próbek materiału biologicznego krew pobierana jest zawsze jako ostatnia

Zestaw do pobraniaa próbki

W celu pobrania próbki, należy użyć:

- 1 pojemnik z białą nakrętką i czarna kreską (wymagany poziom zebranej śliny).



WAŻNE

Pobierana ślina powinna być czysta, bez domieszki **plwociny ani śladów krwi z dziąseł.**

Próbki należy pobierać **na czczo, rano, przed godziną 10:00, przed myciem zębów.**

PRZED WYKONANIEM POBRANIA:

Prosimy o konsultację z lekarzem w celu ustalenia, czy aktualnie stosowane leczenie (leki, suplementy diety itp.) powinno zostać czasowo wstrzymane.



KROK 1

Napisz na etykiecie próbówki **kod pacjenta, datę urodzenia, datę oraz godzinę pobrania materiału.**



KROK 2

Dokładnie umyj ręce.



KROK 3

Zbieraj ślinę **bezpośrednio do próbówki**, aż do osiągnięcia poziomu czarnej kreski.



KROK 4

Zamknij pojemnik i umieść go w dołączonym woreczku transportowym.