

## INSTRUKCJA POBRANIA

### TEST GENETYCZNY



#### WAŻNE

W przypadku pobierania różnych próbek materiału biologicznego krew pobierana jest zawsze jako ostatnia

#### Material

##### Do pobrania wymazu, należy użyć:

- 1 wymazówka
- 1 probówka z niebieską nakrętką



#### WAŻNE

##### Probówki nie wolno płukać.

Zawiera ona tiocyjanian guanidyny, niezbędny do przeprowadzenia badania.

– Nie jeść, nie pić, nie palić ani nie żuć gumy na 30 minut przed pobraniem próbki śliny.




#### KROK 1

Opisz probówkę podając swój **kod pacjenta, datę i godzinę pobrania wymazu.**



## KROK 2

Dokładnie umyj ręce.

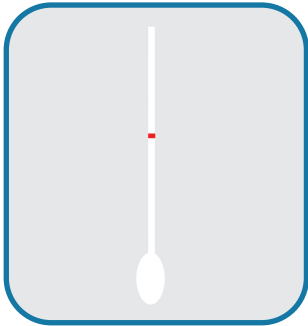


## KROK 3

Otwórz sterylne opakowanie i wyjmij wymazówkę.  
**Uważaj, aby nie dotknąć końcówki wymazówki palcami.**




## KROK 4

Włóż wymazówkę do ust i **pocieraj wewnętrzną stronę policzków przez 1 do 2 minut**.

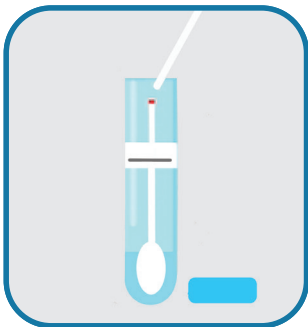

## KROK 5

Umieść wymazówkę w probówce i **złam jej trzonek w miejscu oznaczonym czerwoną kreską**.

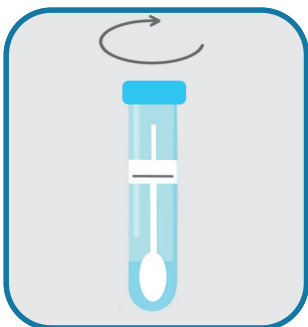

## KROK 6

Zamknij szczelnie probówkę i umieść ją w przeznaczonym do tego woreczku. **Nie zapomnij dołączyć do wysyłki zgody na badanie genetyczne.**